

⚠ IMPORTANT

Ne pas envoyer votre échantillon le **vendredi**, le **week-end**, ni la **veille** ou **l'avant-veille d'un jour férié**.

FÉRIÉS 2023 BELGIQUE

Mercredi 1 novembre 2023
Samedi 11 novembre 2023
Lundi 25 décembre 2023

FÉRIÉS 2024 BELGIQUE

Lundi 1 janvier 2024
Dimanche 31 mars 2024
Lundi 1er avril 2024
Mercredi 1er mai 2024
Jeudi 9 mai 2024
Dimanche 19 mai 2024
Lundi 20 mai 2024
Dimanche 21 juillet 2024
Jeudi 15 août 2024
Vendredi 1er novembre 2024
Lundi 11 novembre 2024
Mercredi 25 décembre 2024

FÉRIÉS 2025 BELGIQUE

Mercredi 1 janvier 2025
Dimanche 20 avril 2025
Lundi 21 avril 2025
Jeudi 1er mai 2025
Jeudi 29 mai 2025
Dimanche 8 juin 2025
Lundi 9 juin 2025
Lundi 21 juillet 2025
Vendredi 15 août 2025
Samedi 1er novembre 2025
Mardi 11 novembre 2025
Jeudi 25 décembre 2025

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 :

✉ logistique@mbnext.be

☎ 0800.943.946 (numéro vert gratuit au départ de la France)
0032.10.870.834

www.lims-mbnext.be



lims
LABORATOIRE
D'ANALYSES MÉDICALES
mbnext group
EUROPE

MODALITÉ DE TRANSPORT

 **chronopost**



▶ SI VOUS AVEZ REÇU VOTRE KIT DANS UNE BOÎTE EN CARTON CONTENANT UNE TROUSSE :

Placez uniquement le **gel pack flexible** au congélateur **minimum 48h00 avant** les prélèvements.

Identifiez les tubes : **nom, prénom et date de naissance.**

Une fois les prélèvements effectués, les tubes doivent être conservés au réfrigérateur en attendant la mise en place dans la trousse.



Placez les tubes ainsi que le coton absorbant dans le sachet Emball'Infor : veillez à bien refermer celui-ci.



Placez le **formulaire de demande d'analyses**, vos ordonnances, chèques et tout autre document papier dans la pochette prévue à cet effet.



Placez le sachet Emball'Infor, la pochette de documents ainsi que le gel pack dans la trousse.



Refermez la trousse et placez-la dans la boîte en carton.



Refermez la boîte en carton et placez-la dans le sachet Chronopost Express sur lequel est apposé le bordereau.

▶ SI VOUS AVEZ REÇU VOTRE KIT DANS UNE BOÎTE EN CARTON CONTENANT UNE BOÎTE ISOTHERME :

Placez uniquement le **pack réfrigérant** au congélateur **minimum 48h00 avant** les prélèvements.

Identifiez les tubes : **nom, prénom et date de naissance.**

Une fois les prélèvements effectués, les tubes doivent être conservés au réfrigérateur en attendant la mise en place dans le caisson.



Placez les tubes ainsi que le coton absorbant dans le sachet Emball'Infor : veillez à bien refermer celui-ci.



Placez le **formulaire de demande d'analyses**, vos ordonnances, chèques et tout autre document papier dans la pochette prévue à cet effet.



Placez le sachet Emball'Infor et la pochette de documents dans la boîte isotherme.



Placez le séparateur sur le sachet Emball'Infor.



Placez le pack réfrigérant sur le séparateur.



Refermez le boite isotherme. Placez la boîte isotherme dans l'emballage cartonné portant l'inscription UN 3373.



Scellez l'emballage cartonné avec les étiquettes fournies à cet effet.

▶ SOIT UN BORDEREAU EST DÉJÀ COLLÉ SUR LE DESSUS DU SACHET CHRONOPOST OU DE LA BOÎTE EN CARTON :



OU



- Déposez le colis dans un bureau de poste le jour même du prélèvement avant la levée Chronopost*.

▶ SOIT UN BORDEREAU MANUEL SE TROUVE DANS VOTRE COLIS :



- Remplissez le bordereau d'expédition «renseignement expéditeur».
 - Déposez le colis au bureau de poste le jour même du prélèvement avant la levée Chronopost*.
 - Remettez le «bon de paiement en compte» Chronopost ainsi que le bordereau au guichet.
- Veillez à conserver la preuve d'expédition (feuille n°2).

*Pour connaître l'heure de levée Chronopost, merci de vous renseigner auprès du bureau de poste le plus proche de votre domicile.

IMPORTANT

Le transport est prépayé et **déjà inclus dans le montant de vos analyses**. Ne pas effectuer d'envoi Chronopost international. Ne rien payer à Chronopost.

Le bordereau a une validité de 2 mois.

VOTRE BORDEREAU EST ARRIVÉ À EXPIRATION ?

Contactez notre service logistique par mail à l'adresse logistique@mbnnext.be ou par téléphone au 0800.943.946 (numéro vert, gratuit au départ de la France).

Pour suivre votre colis, rendez-vous sur www.chronopost.fr.