

## MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

### MICROBIOTE ARN 16S + AGCC

#### **!** IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

#### MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 tube à bouchon brun.
- 1 tube à bouchon brun avec stabilisateur.
- 1 support de recueil (Fe-Col).

#### **!** IMPORTANT

Le tube fourni contenant du liquide ne peut pas être rincé. Il contient un stabilisateur indispensable à l'analyse.

#### INFORMATION PRATIQUE

Si vous devez également réaliser un prélèvement sanguin, vous avez la possibilité de recueillir vos selles la veille ou le jour-même du prélèvement. Veillez cependant à bien conserver votre échantillon de selles au frigo jusqu'à préparation de l'expédition.

*AVANT DE RÉALISER VOS PRÉLÈVEMENTS : Merci de prendre conseil auprès de votre médecin afin de voir si votre traitement en cours (médicament, complément alimentaire...) doit éventuellement être momentanément suspendu.*



## ÉTAPE 1



Notez sur l'étiquette des deux tubes fournis : votre nom, prénom et date de naissance.

## ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

## ÉTAPE 3




Séchez le rebord des toilettes avec du papier et **placez le support de recueil** en suivant les instructions sur l'emballage.

## ÉTAPE 4



Émettez vos selles sur le support et **recueillez un peu de selles à l'aide de la cuillère intégrée** à chacun des tubes (2 noisettes de selles par tube).

## ÉTAPE 5

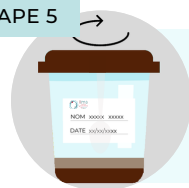

Fermez hermétiquement les tubes puis **secouez vigoureusement le tube contenant le stabilisateur**. Placez-les ensuite dans le sachet prévu à cet effet.