

FECALSWAB

IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 sachet pelable stérile contenant un écouvillon floqué et un tube à bouchon vert.
- 1 support de recueil (Fe-Col).

IMPORTANT

Le tube fourni ne peut pas être rincé.

Il contient un stabilisateur indispensable à l'analyse.

INFORMATION PRATIQUE

Si vous devez également réaliser un prélèvement sanguin, vous avez la possibilité de recueillir vos selles la veille ou le jour-même du prélèvement. Veillez cependant à bien conserver votre échantillon de selles au frigo jusqu'à préparation de l'expédition.

AVANT DE RÉALISER VOS PRÉLÈVEMENTS : Merci de prendre conseil auprès de votre médecin afin de voir si votre traitement en cours (médicament, complément alimentaire...) doit éventuellement être momentanément suspendu.



Séchez le rebord des toilettes avec du papier et placez le support de recueil en suivant les instructions sur l'emballage. Émettez vos selles sur le support.



Ouvrez le sachet pelable. Prenez l'écouvillon en évitant de toucher l'embout.



Trempez l'intégralité de l'embout de l'écouvillon floqué dans l'échantillon de selles et effectuez une rotation pour que l'embout soit intégralement immergé de selles. Remarque : échantillonnez de préférence les parties visqueuses ou liquides des selles.



Retirez l'écouvillon et vérifiez que la matière fécale est visible sur l'embout de l'écouvillon. Si besoin, trempez à nouveau l'écouvillon dans l'échantillon de selles et effectuez un mouvement de rotation.



Transférez l'écouvillon dans le tube FecalSwab et assurez-vous que le niveau maximum de remplissage "MAX.FILL" indiqué sur l'étiquette soit respecté.



Éloignez le tube de votre visage. Maintenez l'extrémité de la tige et pliez celle-ci à un angle de 180° afin de casser l'écouvillon au niveau de la partie sécable.



Jetez la partie supérieure de la tige de l'écouvillon et vissez le bouchon à fond. Secouez le tube jusqu'à ce que l'échantillon semble homogène.



Notez votre nom, prénom et la date de prélèvement sur le tube.