



BEMONSTERINGS METHODEN ONTLASTING MET STABILISATIE

! **BELANGRIJK** ALS U VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET NEMEN, MOET ER ALTIJD ALS LAATSTE BLOED WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze bemonstering uit te voeren, stellen wij u ter beschikking:

- 1 tube met bruine dop.
- 1 collectie stand (Fe-Col).

! **BELANGRIJK**

De bijgeleverde tube mag niet gespoeld worden.

Het bevat een stabilisator die essentieel is voor de analyse.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Als u probiotica neemt, moet u daarmee ten minste 7 dagen voor de monsterneming stoppen.

Als er ook een bloedmonster moet worden afgenomen, kunt u de dag voor of de dag van het bloedonderzoek uw ontlasting opvangen. Zorg er echter voor dat u uw ontlastingmonster in de koelkast bewaart tot u klaar bent om het op te sturen.

VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT : Raadpleeg je arts om na te gaan of je huidige behandeling (medicatie, voedingssupplement, etc.) tijdelijk stopgezet moet worden.



STAP 1



Noteer op het etiket van het buisje uw volledige naam, geboortedatum, datum en tijdstip van afname.

STAP 2



Was je handen grondig.

STAP 3



Droog de rand van het toilet met papier en plaats de opvangbak volgens de aanwijzingen op de verpakking.

STAP 4



Plaats uw ontlasting uit op de houder en vang een kleine hoeveelheid ontlasting op met het lepeltje in het buisje (2 noten ontlasting).

STAP 5



Sluit de buis goed af en schud hard. Doe het dan in de daarvoor bestemde zak.