



MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

HÉMOCULTURE - SANGUIN

⚠ IMPORTANT SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser le prélèvement sanguin qui doit impérativement être effectué par un professionnel de la santé agréé et formé au **prélèvement en laboratoire**, nous vous fournissons selon les analyses recommandées :



Le ou les flacon(s) d'hémoculture(s) aérobie et/ou anaérobie

Un corps de prélèvement

Une compresse

Une aiguille



Une lingette d'alcool

Un pansement



Le ou les tube(s) de sang correspondant(s) aux analyses prescrites

AVANT DE RÉALISER VOS PRÉLÈVEMENTS : Merci de prendre conseil auprès de votre médecin afin de voir si votre traitement en cours (médicament, complément alimentaire...) doit éventuellement être momentanément suspendu.



IMPORTANT

Le prélèvement sanguin doit être réalisé à jeun.

Les flacons d'hémocultures sont toujours prélevés en premier lieu (suivi des tubes de sang le cas échéant). Par ponction veineuse directe préférentiellement. En cas de dispositif intravasculaire, prélever simultanément des hémocultures en périphérie puis sur la voie avec 8 à 10 ml de sang par flacon (quantité optimale) dans la mesure du possible.

Afin de limiter les risques de contamination, il est important de **respecter un ordre de prélèvement et de remplissage** des tubes :

- 1 sérum (tube rouge)
- 2 citrate (tube bleu)
- 3 EDTA (tube mauve)
- 4 glucose (tube gris)
- 5 hépariné (tube vert)

Le nombre et le type (couleur) de tubes sont adaptés en fonction des analyses qui vous ont été prescrites.

Toutes les analyses ne nécessitent pas ces cinq types de tubes. Si l'une des couleurs n'est pas présente dans le kit, le professionnel de la santé procèdera au tube suivant.

Notez sur l'étiquette de chacun des tubes les informations patient : nom, prénom, date de naissance.