

VERZAMELMETHODE

MRSA

BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze steekproef te kunnen nemen, stellen wij u het volgende ter beschikking:

- 1 wattenstaafje.
- 3 tubes met roze dopjes.


BELANGRIJK

De slang kan niet worden uitgespoeld.
Het bevat een AMIES-vloeistofmedium dat essentieel is voor de analyse.

Voordat het monster wordt genomen:
Deze uitstrijkjes moeten worden afgenomen vóórdat er andere handelingen worden verricht die de resultaten kunnen beïnvloeden (bijv. douchen of wassen met antiseptische zeep, het gebruik van een mondspoeling met desinfectiemiddel, het aanbrengen van zalf op de neus, enz.).



STAP 1

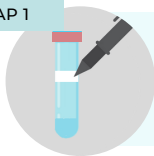


Schrijf uw naam, achternaam en het ophaaltijdstip op het etiket van de meegeleverde buis.

STAP 2




Was je handen grondig.

STAP 3

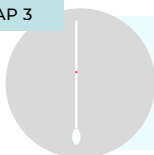

Open de steriele verpakking en haal het wattenstaafje eruit. Raak de punt van het wattenstaafje niet met uw vingers aan.

STAP 4

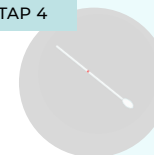


Voer de uitstrijkjes uit met behulp van de drie meegeleverde buisjes met roze dop:

~~De mond:~~ Uitstrijkje van de binnenkant van de keel (keelholte - strottenhoofd)

• Neus: Neusuitstrijkje (neusholte, hetzelfde wattenstaafje voor beide neusgaten).

• De liesplooi: Uitstrijkje van de liesplooien (vochtig perineumgebied, hetzelfde wattenstaafje voor beide zijden).

STAP 5

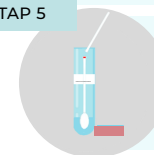

Plaats het wattenstaafje in het buisje en breek het steeltje af bij de rode lijn.

STAP 6



Sluit de tube goed af en plaats deze in de daarvoor bestemde zak.