

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

MICROBIOTE ARN 16S + AGCC

! IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 pot à bouchon rouge.
- 1 pot à bouchon brun avec stabilisateur.
- 1 support de recueil (Fe-Col).

! IMPORTANT

Le pot fourni contenant du liquide ne peut pas être rincé.
Il contient un stabilisateur indispensable à l'analyse.

INFORMATION PRATIQUE

Si vous devez également réaliser un prélèvement sanguin, vous avez la possibilité de recueillir vos selles la veille ou le jour-même du prélèvement. Veillez cependant à bien conserver votre échantillon de selles au frigo jusqu'à préparation de l'expédition.

AVANT DE RÉALISER VOS PRÉLÈVEMENTS : Merci de prendre conseil auprès de votre médecin afin de voir si votre traitement en cours (médicament, complément alimentaire...) doit éventuellement être momentanément suspendu.



ÉTAPE 1



Notez sur l'étiquette des deux pots fournis : votre nom, prénom et date de naissance.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3



Séchez le rebord des toilettes avec du papier et **placez le support de recueil** en suivant les instructions sur l'emballage.

ÉTAPE 4



Émettez vos selles sur le support.

- **Pour le pot à bouchon BRUN :** recueillez un peu de selles à l'aide de la cuillère intégrée - 2 noisettes de selles.
- **Pour le pot à bouchon ROUGE :** Veillez à ne pas trop remplir le pot, celui-ci ne doit l'être qu'à moitié.

ÉTAPE 5



Fermez hermétiquement les 2 pots.

Secouez uniquement et vigoureusement le pot à bouchon brun contenant le stabilisateur.

Placez-les ensuite dans le sachet prévu à cet effet.