

VERZAMELMETHODE

16S RNA-MICROBIOTA + CGA



BELANGRIJK

ALS JE VERSCHILLENDE SOORTEN MONSTERS MOET AFNEMEN, MOET HET BLOEDMONSTER ALTIJD ALS LAATSTE WORDEN AFGENOMEN.

MATERIAAL

Om deze steekproef te kunnen nemen, stellen wij u het volgende ter beschikking:

- 1 pot met een rood deksel.
- 1 pot met bruin deksel en stabilisator.
- 1 collectieondersteuning (Fe-Col).



BELANGRIJK

De meegeleverde vloeistofcontainer mag niet worden afgespoeld.
Deze bevat een stabilisator die essentieel is voor de analyse.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Als er ook een bloedmonster afgenomen moet worden, kunt u uw ontlasting de dag vóór of op de dag van de test verzamelen. Zorg er wel voor dat u uw ontlasting gekoeld bewaart tot het klaar is voor verzending.

- *VOORDAT U UW MONSTERS NEEMT: Raadpleeg uw arts om te bepalen of uw huidige behandeling (medicatie, voedingssupplementen, enz.) mogelijk tijdelijk moet worden onderbroken.*



STAP 1



Schrijf op het etiket van de twee meegeleverde potjes: uw naam, achternaam en geboortedatum.

STAP 2



Was je handen grondig.

STAP 3



Droog de toiletbrilrand af met papier en plaats de opvangbak volgens de instructies op de verpakking.

STAP 4



Plaats uw krukjes op de steun.

Voor de pot met het BRUINE deksel: neem een beetje ontlasting met behulp van het ingebouwde lepeltje - ongeveer 2 hazelnootgrote hoeveelheden ontlasting.

- Voor de pot met het RODE deksel: Let op dat u de pot niet te vol doet, hij moet maar halfvol zijn.

STAP 5



Sluit beide potten goed af. Schud alleen de pot met het bruine deksel, die de stabilisator bevat, krachtig. Plaats ze vervolgens in de meegeleverde zak.