

⚠ IMPORTANT

Ne pas envoyer votre échantillon le vendredi, le week-end, ni la veille ou l'avant-veille d'un jour férié.

FÉRIÉS 2026 BELGIQUE

Jeudi 1er janvier 2026
Lundi 06 avril 2026
vendredi 1er mai 2026
Jeudi 14 mai 2026
Lundi 25 mai 2026
Mardi 21 juillet 2026
Samedi 15 août 2026
Dimanche 1er novembre 2026
Mercredi 11 novembre 2026
Vendredi 25 décembre 2026

FÉRIÉS 2027 BELGIQUE

Vendredi 1er janvier 2027
Lundi 29 mars 2027
Samedi 1er mai 2027
Jeudi 06 mai 2027
Lundi 17 mai 2027
Mercredi 21 juillet 2027
Dimanche 15 août 2027
Lundi 1er novembre 2027
Jeudi 11 novembre 2027
Samedi 25 décembre 2027

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 :

✉ logistique@mbnext.be

☎ 0800.943.946 (numéro vert gratuit au départ de la France)
0032.10.870.834

www.lims-mbnext.be



lims
LABORATOIRE
D'ANALYSES MÉDICALES
mbnext group
EUROPE

MODALITÉ DE TRANSPORT

 **chronopost**



▶ SI VOUS AVEZ REÇU VOTRE KIT DANS UNE BOÎTE EN CARTON CONTENANT UNE TROUSSE :

Placez uniquement le **gel pack** au congélateur **minimum 48h00 avant** les prélèvements.

Identifiez les tubes : **nom, prénom et date de naissance.**

Une fois les prélèvements effectués, les tubes doivent être conservés au réfrigérateur en attendant la mise en place dans la trousse.



Placez tous les prélèvements, ainsi que le coton absorbant, dans le sachet Emball'Infor : veillez à bien refermer celui-ci.



Placez le formulaire de demande d'analyses, le bon de commande ou tout autre document papier dans la pochette prévue à cet effet.



Placez le sachet Emball'Infor, la pochette de documents ainsi que le gel pack dans la trousse. Placer le gel pack dans le fond de la trousse suivi du séparateur.



Refermez la trousse et placez-la dans la boîte en carton.



Refermez la boîte en carton et placez-la dans le sachet Chronopost Express sur lequel est apposé le bordereau.

▶ SI VOUS AVEZ REÇU VOTRE KIT DANS UNE BOÎTE EN CARTON CONTENANT UNE BOÎTE ISOTHERME :

Placez uniquement le **pack réfrigérant** au congélateur **minimum 48h00 avant** les prélèvements.

Identifiez les tubes : **nom, prénom et date de naissance.**

Une fois les prélèvements effectués, les tubes doivent être conservés au réfrigérateur en attendant la mise en place dans le caisson.



Placez tous les prélèvements ainsi que le coton absorbant dans le sachet Emball'Infor : veillez à bien refermer celui-ci.



Placez le formulaire de demande d'analyses, le bon de commande ou tout autre document papier dans la pochette zippée transparente prévue à cet effet.



Placez le sachet Emball'Infor et la pochette de documents dans la boîte isotherme.



Ensuite, placez le séparateur.



Placez le pack réfrigérant sur le séparateur.



Refermez le boîtier isotherme. Placez la boîte isotherme dans l'emballage cartonné portant l'inscription UN 3373.



Scellez l'emballage cartonné avec les étiquettes fournies à cet effet.

▶ SOIT UN BORDEREAU EST DÉJÀ COLLÉ SUR LE DESSUS DU SACHET CHRONOPOST OU DE LA BOÎTE EN CARTON :



OU



- Déposez le colis dans un bureau de poste le jour même du prélèvement sanguin avant la levée Chronopost*.

▶ SOIT UN BORDEREAU MANUEL SE TROUVE DANS VOTRE COLIS :



- Remplissez le bordereau d'expédition «renseignement expéditeur».
 - Déposez le colis au bureau de poste le jour même du prélèvement avant la levée Chronopost*.
 - Remettez le «bon de paiement en compte» Chronopost ainsi que le bordereau au guichet.
- Veillez à conserver la preuve d'expédition (feuillet n°2).

*Pour connaître l'heure de levée Chronopost, merci de vous renseigner auprès du bureau de poste le plus proche de votre domicile.

IMPORTANT

Le transport est prépayé et **déjà inclus dans le montant de vos analyses**. **Ne pas effectuer d'envoi Chronopost international. Ne rien payer à Chronopost.**

Le bordereau a une validité de 2 mois.

VOTRE BORDEREAU EST ARRIVÉ À EXPIRATION ?

Contactez notre service logistique par mail à l'adresse logistique@mbnnext.be ou par téléphone au 0800.943.946 (numéro vert, gratuit au départ de la France).

Pour suivre votre colis, rendez-vous sur www.chronopost.fr.